

# Speichelprobenahme für die Drogenanalytik

## KURZANLEITUNG


Vor der Speichelprobenahme sollte mindestens 30 Minuten lang **weder gegessen noch getrunken** sowie die **Einnahme von Medikamenten** und das **Rauchen** vermieden werden.

Bitte beachten Sie, dass bei Substitutionspatienten\*innen die Probenahme vor der nächsten oralen Gabe erfolgt.



1


Vor der Probenahme die **Mundhöhle kurz** mit **sterilem Wasser spülen** (Aqua, 10 ml Ampulle) und den Inhalt ausspucken. Diese Flüssigkeit nicht im Becher sammeln!

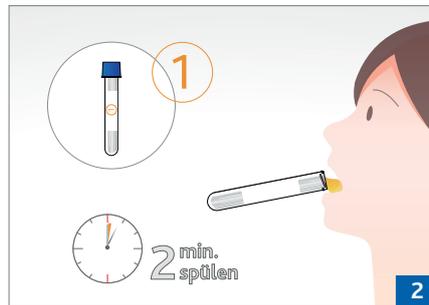

2


Röhrchen mit blauer Kappe **1** öffnen und die **Mundhöhle** mit der **gelben Sammel-lösung für 2 min spülen**.

Durch die saure Sammel-lösung wird der Speichelfluss angeregt.

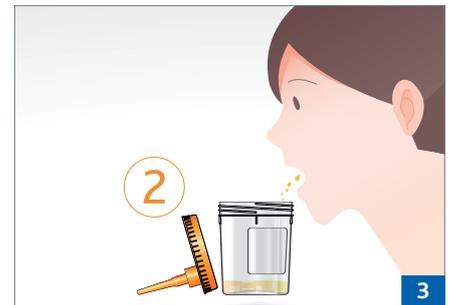


3

**Mundinhalt** in den **Sammelbecher 2** überführen und den Deckel schließen.

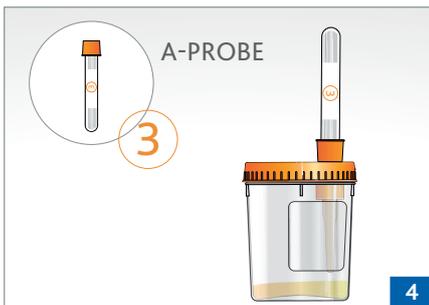


4

Deckelaufkleber entfernen, Becher auf eine ebene Fläche stellen und das **erste Proben-röhrchen 3** ungeöffnet(!) mit der orangenen Kappe nach unten in die **Deckelöffnung drücken**. Durch Unterdruck wird die Probe in das Röhrchen überführt. Das Volumen für die A-Probe sollte mindestens 1 ml betragen.

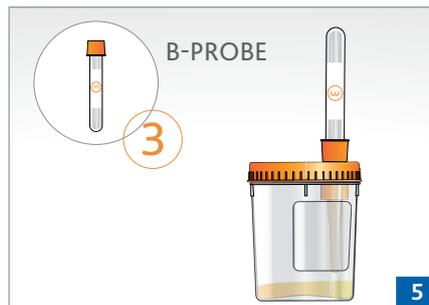

5

Schritt 4 mit dem **zweiten Probenröhrchen 3** für die B-Probe wiederholen.

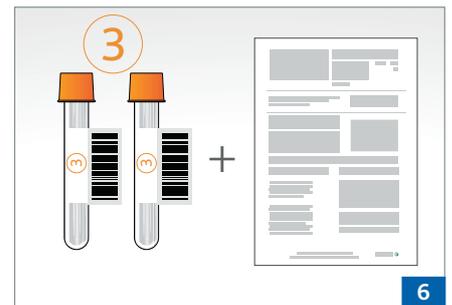

6

Die gefüllten Probenröhrchen **3** mit Barcode **kennzeichnen** und mit einem ausgefüllten Anforderungsschein **an unser Labor** senden. Eine Zwischenlagerung bei 2-8°C ist zulässig.

**Materialien für die Speichelprobenahme**

Diese Materialien können Sie kostenfrei bei uns anfordern.

Menge pro Probenahme	Produkt	Verpackungseinheit
	Aqua, 10 ml Ampullen	 20 Stk.
	Speichel-Sammellösung: Röhrchen ① (blaue Kappe)	 50 Stk.
	Speichel-Sammelbecher ②	Einzel verpackt
	Speichel-Probenröhrchen ③ (orange Kappe) für die A-Probe für die B-Probe	 50 Stk.

**Haben Sie noch Fragen?**

**Sprechen Sie uns an!**

**amedes MVZ für Laboratoriumsdiagnostik und  
Mikrobiologie Halle/Leipzig GmbH**

Leipziger Chaussee 191f  
06112 Halle

Telefon 0345.445 07 100

Telefax 0345.445 07 210

info@amedes-halle-leipzig.de

www.amedes-halle-leipzig.de