

Hinweis Probenahme von Dialyseflüssigkeiten

Nummer: KI-11455

- Die Proben sind an den installierten Auslässen des Verteilungssystems zu entnehmen.
- Vor der Probenahme muss die Innenseite des Auslasses durch Spülen oder Abwischen mit 70-prozentigem Alkohol oder Isopropylalkohol desinfiziert werden. Die Expositionsdauer soll mindesten 15 Sekunden betragen.
- Von den Probenmaterialien sind je 100 ml in sterilen Behältnissen aufzufangen.
- Die Proben sollten umgehend und gekühlt (4 - 8°C) in das Labor transportiert werden.

Der Transport erfolgt in gekühlten Transportboxen per Kurier.